

## Y4 Bangle 取扱説明書 **保証書付**

取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。

この取扱説明書はいつでも見ることができる場所に大切に保管してください。

株式会社 Y4.com

### 無料修理規定

1. 取扱説明書に従った正常な使用状態で、保証書のご提示と購入履歴が確認できる場合、保証期間内は無料修理又は交換対応いたします。
  2. 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
    - (a)本書のご提示があった場合でもご購入履歴がない場合。
    - (b)本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えた場合。
    - (c)使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・破損。
    - (d)お買い上げ後の落下、水没などによる故障・損傷。
    - (e)火災・公害・異常電圧・定格外の使用電源(電圧、周波数)および地震・雷・風水害その他天災地変など、外部に原因がある故障・損傷。
    - (f)取扱説明書に記載されている使用条件以外で使用したときの故障または損傷。
    - (g)業務用としての使用、車両・船舶への搭載など一般家庭以外に使用された場合などによる故障・損傷。
    - (h)ご使用後のキズ・汚れ・変色および保管上の不備による損傷。
    - (i)消耗部品の交換・仕様変更など。
  3. 本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.
  4. 個人情報の取扱いについて  
本保証書にご記入いただいたお客様の個人情報は、保証期間内のサービス活動や保証期間経過後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。修理のために、当社から修理委託する保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございます。その場合は当社が厳重に管理いたしますので、あわせてご了承ください。
- この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従いましてこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
  - 保証期間経過後の修理または修理用性能部品の保有期間につきまして、詳しくは取扱説明書をご覧ください。

## <保証書>

この保証書は、本書記載内容の範囲で無料保証させていただくことをお約束するものです。保証期間中に故障が発生した場合は、修理をご依頼のうえ、本書をご提示ください。お買い上げ年月日、販売店名などの記入漏れがありますと無効です。本書は再発行いたしません。大切に保管してください。

商品名 Y4 Bangle

お名前

TEL

住所 〒

Vital gain ID

販売店名・住所・電話番号

お買い上げいただきありがとうございます。

保証書にご記入ください。

●販売店名:株式会社 Y4.com

●住所:東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエアイースタワー4F

●TEL:03-5219-1343

●発送日:

保証期間 お買い上げ年月日 年 月 日 より1年間

●保証書送付先 <https://help.vitalgain.jp/>

販売元:株式会社 Y4.com




〒100-0004 東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエアイースタワー4F





## 安全上の注意





お使いになる前に必ずお読みください。

ここに示した注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防止するため、安全に関する重要な内容です。必ずお守りください。

誤った使い方をしたときに生じる内容を、3つに区分しています。

 <b>危険</b>	取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う危険性があり かつその切迫の度合いが高い
 <b>警告</b>	取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う可能性が想定される 軽傷または物的損害が発生する頻度が高い
 <b>注意</b>	取り扱いを誤ると、損害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される

<b>危険</b>	
 <b>禁止</b>	火のそばやストーブの近く、高温になった車の中など、高温の場所で使用、保管、放置しない 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
 <b>禁止</b>	火の中に入れたり、電子レンジやオープンなどで加熱しない 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
 <b>分解禁止</b>	分解、修理、改造は行わない 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
 <b>水ぬれ禁止</b>	飲料水・汗・海水・ペットの尿などの液体で濡らしたり、濡れたまま使用しない 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

<b>警告</b>	
 <b>禁止</b>	心臓ペースメーカーを装着している人は使用しない 電波の影響により、心臓ペースメーカーの動作に影響を与えることがあります。
 <b>注意</b>	使用場所に関するご注意 無線通信が禁止されている場所では、絶対に使用しないで禁止ください。 電波の影響により、機器の動作に影響を与えることがあります。
 <b>禁止</b>	ハンマーなどでたたいたり、重いものを載せたり、踏みつけたり、落下させるなどの衝撃や力をあたえない 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
 <b>必ず行う</b>	USB 接続端子は根元まで確実に差し込む 正しく抜き差ししないと、火災、やけど、感電などの原因となります。

<b>注意</b>	
❗	周囲の温度が 10～40℃の範囲内で使用、充電する 必ず行う 破損や故障の原因となります。
❗	化粧品、ハンドクリームなど油成分が付着した場合はすぐにふきとる 必ず行う 破損や故障の原因となります。
⊘	殺虫剤、ベンジン、シンナーなど揮発性のものをかけない 禁止 破損や故障の原因となります。
⊘	不安定な場所に置かない 禁止 破損や故障の原因となります。
❗	コネクタ、USB ポートにほこりがたまっていないか、定期的に点検する 必ず行う 破損や故障の原因となります。
❗	USB 接続端子の接続方向を確認して接続する 必ず行う 正しい方向に抜き差ししないと、破損や故障の原因となります。

### **お手入れのしかた**

- ❗ 糸くずの出ない柔らかい布でふいてください。
- ❗ 汚れのひどいときは水でうすめた台所用洗剤(中性)に浸した柔らかい布をよく絞り、汚れをふいてください。
- ⊘ ベンジン、シンナーなど揮発性のものをかけないでください。
- ❗ コネクタ、USB ポートを定期的に点検し、ほこりがたまっていたら綿棒やブラシでほこりを取り除いてください。

## 製品概要

### 内容物

・Y4Bangle	・取扱説明書[保証書付]………1
-----------	------------------

### 準備するもの

本製品、サービスを利用するためには、以下のものが別途必要です。

・スマートフォン………1 iPhone—iOS8.0 以降の端末 / Android—Android4.4 以降の端末 ※iPad および iPad touch では動作を保証していません。 ※Android 4.4 以降の全ての機種での動作を保証していません。 ※データを閲覧する必要がある場合、スマートフォンが必要になります。
--

### 商品名 : Y4Bangle

- ・充電時間: 1～2 時間
- ・防水等級: IP67
- ・手首周囲: 150mm～260mm
- ・重量: 25g

### 仕様

工事設計認証番号: R214-104532

チップ	NRF52832
PPG	OSRAM 5FH7060
画面	0.96OLFD
バッテリー	150mAh
重量	25g
素材	TPU

### パラメータ:

チップ: Nordic N52832

ディスプレイ: OLED 0.96

電池: 150mAH

待ち受け時間: 5 日

スマホ対応: iOS 8.0 以上、Android 4.4 以上及び Bluetooth4.0 以上の端末に対応。

心拍数の測定: 適用

自動スクリーン: 適応

## 使用方法 準備

### <充電する>

工場出荷時は内蔵電池が十分に充電された状態ではありません。充電してからご使用ください。

#### Y4Bangle 充電方法

Y4Bangle は USB 充電タイプのデバイスです。

バンドの部分を図のように取り外し、金属部分を USB ポートへ差し込んでください。

USB ポートへ差し込むと、充電開始合図としてデバイスが振動します。

※下記の赤丸を「USB ポート」へ差し込んでください。

※振動しない場合は、充電されていない可能性があるご注意ください。

※USB 接続端子の接続方向を確認し、正しい方向に抜き差ししないと、破損や故障の原因となります。



### <アプリをダウンロードする>

#### Vitalgain アプリのダウンロード

スマートフォンにて「VitalGain」アプリをインストールしてください。

<ダウンロード方法: ① or ②を試してください。>

①下記のQRコード読取方法。

②「バイタルゲイン アプリ」と入力して、web検索するとダウンロードのページが表示されます。

iOS版

<https://itunes.apple.com/app/id1447868321>



Android版

<https://play.google.com/store/apps/details?id=vitalgain.jp>



本マニュアルは介護の目的でご家族の方または関係者の方がバイタルデータを閲覧するためのサービスになります。

Y4 Bangleの表示される時間が正確に反映されていない場合、ダッシュボードに表示される数値が正確に反映されない場合がありますので、必ずY4 Bangleの時間は合わせてご利用ください。


## <アプリにログインする>

ウェアラブルを購入した際に提供された ID と PASS ワードでログインを行ってください。

※ID,PASS がない場合は下記の URL からご依頼ください。

### Vitalgain ログイン方法

1. 「Vitalgain」をタップして起動
2. ログインしてください

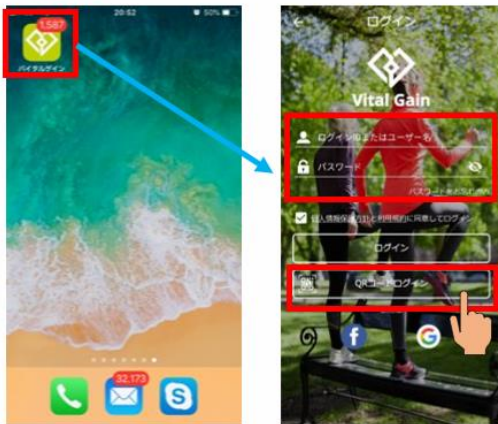

#### 3-1. ログイン方法:手入力

##### アプリ ログインID/PW

同梱されているID/PWを入力してください。

例) Vitalgain アプリ	
ログインID	パスワード
reb20021@frental.jp	12345678

※ログインの際に端末からの「アクセス許可」を求めるポップアップが画面に表示される場合があります。その時は、「許可」を選択してください。

#### 3-2. ログイン方法:QRコード読取

・箱に貼っているログイン用「QRコード」をカメラで読み取ってください。



## <アカウントにウェアラブルを登録する>

ウェアラブルとアカウントを紐づけする設定作業の事です。

### Vitalgainとデバイスの「接続方法」

#### <iOS版 (iPhone)>



#### <電源の入れ方>

・赤枠の部分を約5秒ほど触れると電源がONになります。



- ①一番下の「設定」を選択
- ②「使用デバイス設定へ変更」
- ③「Y4 Bangle」を選択してください。
- ④「OK」を選択してください。
- ⑤デバイスの電源を入ると接続可能なデバイスが表示されます。デバイス選択後、「接続」を選択してください。



## Vitalgainとデバイスの「接続方法」

### <Android版>



#### <電源の入れ方>

・赤枠の部分を約5秒ほど触れて頂くと電源がONになります。



①右下の「設定」を選択



②「使用デバイス 設定へ変更」



③「Y4 Bangle」を選択してください。



④「OK」を選択してください。



⑤デバイスの電源を入れると接続可能なデバイスが表示されます。デバイス選択後、「OK」を選択してください。



## <正確なプロフィール情報を入力する>

予め入力されている情報はサンプルデータになります。

BMI、消費カロリーやアドバイスなどが変わる為、利用前に正確なプロフィールの入力をしてください。


## Vitalgain プロフィールの更新

利用される方のプロフィールに更新をお願いします。



アルコール、喫煙、服薬の有無なども登録をお願いします。

※ 変更後、必ず右上の「更新する」を押してください。

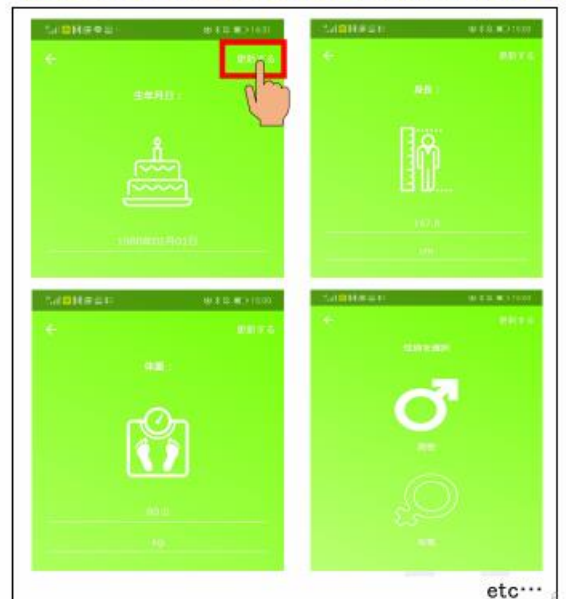

etc...



## <Y4Bangle を装着する>

### 装着方法(適切な装着イメージ)



手首の骨から指一本から二本のほど開けた位置で装着をお願いします。

※正しい位置に装着してください。

※バンドは、ずれない程度に締めてください。

※バンドが緩いと正しく計測されないことがあります。


※デバイスに表示される時間が正しいことを確認してください。

## 7. 同期方法

### ▶同期とは？

「JYouPro」デバイスの画面に表示されている「歩数」等のデータはBangle Station経由で24時間自動でサーバーへアップロードされます。そのデータを閲覧するために、アプリと同期させ、アプリ内にデータを記録することが出来ます。


### <iOS版 (iPhone)>

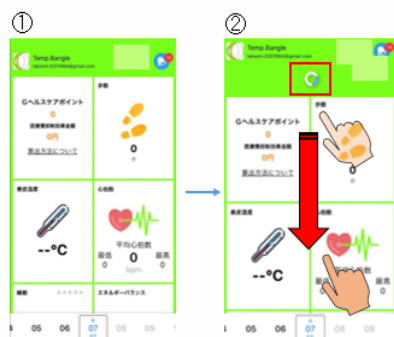

#### <同期方法>

・指で全体的に下へ引っ張ってください。

### <Android版>

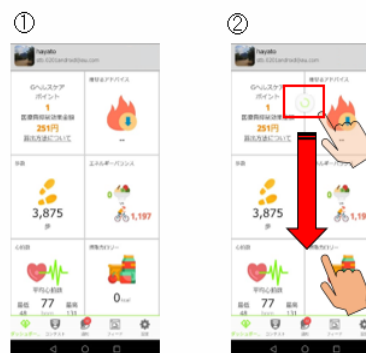

#### <同期方法>

・指で全体的に下へ引っ張ってください。

同期ができない場合の対処法の説明動画はこちら→



## 主な機能の説明について




### 1.睡眠時呼吸不足回数

OSAHSの4段階評価、無呼吸のグラフ表示、体内酸素濃度、低酸素時間、呼吸数、心臓負荷表示の6項目が確認できます。



### 2.睡眠時心肺推移(HRV)

睡眠時の心拍の状態を、グラフと数値で表示。時間ごとの推移が確認できます。

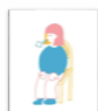

### 3.肺機能のチェック

体内酸素量、呼吸数、疲労度の状態を、計測前、計測後で測定できます。



### 4.運動

赤外線センサー、緑色センサー、信号受信センサーの3つを使用し、歩数、距離、消費カロリーを算出します。

**Y4Bangle の表示される時間が正確に反映されていない場合、ダッシュボードに表示される数値が正確に反映されない場合があります。**

**必ず、Y4Bangle の時間は合わせてご利用ください**

## <ご注意>

**※このデバイスは医療機器レベルの血中酸素濃度を測定しません。あくまでトレンドの目安としてご活用ください。**

Y4Bangle 表示画面説明動画はこちら→



Y4Bangle 充電方法説明動画はこちら→

